

Die Fujifilm Medical IP Kassetten sind zur Verwendung mit den Fujifilm Speicherfoliensystemen, z.B. FCR Profect, FCR Capsula, FCR Prima, FCR XG1, XG 5000, geeignet. Die IP Kassetten bestehen aus Kunststoff und besitzen einen sicheren Verschluss, der von dem jeweiligen Speicherfoliensystem automatisch geöffnet wird. Ein Barcode Fenster im Rahmen der IP Kassette dient zur Identifikation der jeweils verwendeten Speicherfolie.

■ Verfügbare Speicherfolienformate und Abtastrate (Standardauflösung)

Speicherfolie	Abtastrate HQ
15 cm x 30 cm	10 Pixel pro mm
18 cm x 24 cm	10 Pixel pro mm
24 cm x 30 cm	10 Pixel pro mm
35,4 cm x 35,4 cm	10 Pixel pro mm
35,4 cm x 43 cm	10 Pixel pro mm

■ Reinigung von Speicherfolien und IP Kassetten

Bei der Reinigung der IP Kassetten und Speicherfolien müssen flusenfreie Baumwollhandschuhe getragen werden. Eventuell vorhandener Schmutz wird mit einem flusenfreien Stoff (Objektivreinigungstücher) vorsichtig von der Oberfläche der IP Kassette durch Reiben entfernt. Für eine fachgerechte Flächendesinfektion sind folgende Produkte freigegeben: Mikrozid AF Liquid, Bacillo AF, Bacillo Plus, Meliseptol Form Pure und Meliseptol rapid. Ist die IP Kassette mechanisch beschädigt, darf sie nicht weiter verwendet werden und muss durch eine neue IP Kassette ersetzt werden.

Wichtig: Während der Reinigung ist die Speicherfolie aus der IP Kassette zu entnehmen!

Für die Reinigung der Speicherfolien empfehlen wir die folgende Reinigungslösung: Wasserfreies (reines) Ethanol 96% ist die Lösung, die zum Reinigen der Speicherfolien verwendet werden darf. Es wird eine kleine Menge der Lösung auf ein flusenfreies Tuch gegeben und mit leichtem Druck auf der Oberfläche der Speicherfolie verteilt, um die Verunreinigung zu entfernen.

■ Entsorgung von Speicherfolien und IP Kassetten

Speicherfolien und IP Kassetten werden nach der Schlüsselnummer „090199“ als Sondermüll fachgerecht entsorgt.